

MODE D'EMPLOI DES MASQUES ARTISANAUX

Ce masque « anti-projections » est un masque qui sert avant tout à **protéger les autres**, et précisément à empêcher que les expectorations du porteur susceptible d'être contaminé ne soient projetées dans l'air et contaminent l'environnement et les personnes alentour. **Ce masque ne protège pas le porteur des particules.**

Il s'agit d'un masque double-couche "**anti-projections**" et de fabrication **artisanale** (18 cm large sur 17 cm haut environ).

Ce masque n'est pas un dispositif médical au sens du Règlement (UE) 2017/745 / Directive 93/42/CEE, ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement (UE) 2016/425 (ce masque n'est pas un masque buccal EPI FFP2 et FFP3). Ce masque n'est pas soumis à une évaluation de conformité.

Attention : porter un masque peut donner un **faux sentiment de sécurité**. Les règles de **distanciation sociale** et les **gestes barrières** sont à appliquer scrupuleusement malgré l'utilisation des masques.

Attention : ce masque ne peut être utilisé que par des **enfants de plus de 6 ans** en raison notamment du risque de suffocation. Le placement et le port d'un masque pour un enfant doit **impérativement** se faire sous la surveillance d'un adulte.

Attention : le port du masque nécessite une adaptation, à savoir la **sensation d'avoir moins d'air**.

Attention : le port du masque **n'autorise certainement pas un effort intense**, comme la pratique intensive du sport.

Ce masque doit couvrir entièrement **le menton, la bouche et le nez de son porteur**. Ce masque s'attache avec des **cordons à nouer** (voir « Mise en place » ci-après).

Lavez-vous les mains à l'eau et au savon avant de toucher (pour le mettre ou pour le retirer) le masque. **Ne touchez pas l'avant du masque** car il peut être contaminé. Ne touchez que les cordons.

Ne pas dépasser une durée maximale d'utilisation de **4 heures**. Déposer le masque dans un contenant pouvant fermer, en attendant le lavage. Se laver les mains après le retrait.

Avant la première utilisation des masques, il est impératif de laver ce masque à la machine avec de l'eau et du détergent habituel à **60° minimum**, cycle normal soit environ 2 heures. Après lavage, laissez sécher le masque à l'extérieur ou dans un local fortement ventilé. Lavez-vous les mains ensuite.

Un contrôle visuel du masque doit être réalisé après chaque lavage. En cas de détection de tout dommage du masque (moins d'ajustement, déformation, usure, déchirure, etc.), le masque est considéré comme n'étant plus utilisable. Il ne doit plus être porté et doit être jeté.

Mise en place du masque

La **face extérieure** du masque est **noire** ou **blanche** suivant le modèle. L'ouverture du masque doit être positionnée vers le bas.

Nouer d'abord le cordon du bas autour du cou mais sans serrer (le bas du masque doit être positionné entre le cou et le menton). Ensuite, nouer le cordon du haut autour de la tête. Laissez reposer ensuite les cordons du haut sur les oreilles.

Attention : la face extérieure du masque (noire ou blanche) doit être visible lorsque l'on porte le masque. Elle ne peut en aucun cas être placée côté visage.

Le masque est un masque **double-couche**. La matière utilisée est un **tissu synthétique** (65% polyester / 35% coton pour la face intérieure et 100% polyester pour la face extérieure). Cette matière permet au masque d'être lavé et réutilisé. Il est possible d'y glisser un filtre complémentaire. Il est recommandé de ne pas y glisser trop de filtres supplémentaires afin de ne pas empêcher le porteur du masque de respirer.

Ce masque et le présent mode d'emploi ne constituent pas un avis médical, ni une protection absolue des autres, si le porteur est malade. Les personnes malades sont invitées à contacter leur médecin traitant dans les meilleurs délais et à interroger ce dernier quant à la possibilité pour eux de sortir ou non de chez eux, ainsi qu'à toute autre mesure utile de protection de soi-même et des autres (isolement, distanciation, gestes barrières, hygiène, etc.).

info@masks.brussels

Référence : <http://couturiers.masks.brussels/public/certificat-resistance.pdf>

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR ARTISANALE MASKERS

Dit "anti-projectiemasker" is een masker dat vooral dient **om anderen te beschermen**, en in het bijzonder om te voorkomen dat het mogelijk besmette opgehoeste sputum van de drager in de lucht wordt geprojecteerd en het milieu of de mensen in de nabijheid besmet. **Dit masker beschermt de drager niet tegen deeltjes.**

Het is een dubbellaags "anti-projectie" masker, artisaan vervaardigd (ongeveer 18 cm breed bij 17 cm hoog).

Dit masker is geen medisch hulpmiddel in de zin van Verordening (EU) 2017/745 / Richtlijn 93/42/EEG of persoonlijk beschermingsmiddel in de zin van Verordening (EU) 2016/425 (dit masker is geen PBM-mondmasker FFP2 en FFP3). Dit masker is niet onderworpen aan een conformiteitsbeoordeling.

Let op: een masker dragen kan **een vals gevoel van veiligheid geven**. De regels voor **sociale afstand** en **barrièregebaren** moet u, ook bij gebruik van een masker, nauwgezet toepassen.

Let op: dit masker mag alleen worden gebruikt door **kinderen ouder dan 6 jaar**, gezien in het bijzonder het risico op verstikking. Het plaatsen en dragen van een masker voor een kind moet gebeuren onder toezicht van een volwassene.

Let op: het dragen van het masker vraagt om een aanpassing: u moet wennen aan **het gevoel dat u minder lucht heeft**.

Let op: als u een masker draagt, kunt u zich **niet intens inspannen**, zoals bij intensieve sportbeoefening.

Dit masker moet **de kin, de mond en de neus van de drager volledig bedekken**. U bevestigt dit masker met **koordjes die u kunt vastknopen** (zie onder "Zo zet u het masker op").

Was uw handen met water en zeep voordat u het masker aanraakt (om het aan of af te doen). **Raak de voorkant van het masker niet aan**, omdat het besmet kan zijn. Raak alleen de koordjes aan.

Overschrijd de maximale gebruiksduur van **4 uur** niet. Plaats het masker in een afsluitbare container in afwachting van het wassen. Was uw handen nadat u het masker hebt verwijderd.

Voordat u de maskers voor de eerste keer gebruikt, moet u ze in de machine wassen met water en het gebruikelijke wasmiddel, op **minimaal 60°**, in een normale cyclus van ongeveer 2 uur. Het masker kan **25 onderhoudscycli** ondergaan. Laat het masker na het wassen buiten of in een goed geventileerde ruimte drogen. Was dan uw handen.

Na elke wasbeurt moet u een visuele controle van het masker uitvoeren. Als u schade aan het masker vaststelt (verminderde pasvorm, vervorming, slijtage, scheuren...), wordt het masker als onbruikbaar beschouwd. U mag het niet meer dragen en moet het weggoien.

Zo zet u het masker op

De **buitenkant** van het masker is **zwart** of **wit**, afhankelijk van het model. De maskeropening moet naar beneden gericht worden.

Bind het onderste koordje eerst om de hals, maar trek het niet aan (de onderkant van het masker moet tussen de hals en de kin worden geplaatst). Bind dan het bovenste koordje rond het hoofd. Laat de bovenste koordjes op de oren rusten.

Let op: de buitenkant van het masker (zwart of wit) moet zichtbaar zijn als u het masker draagt. De buitenkant mag in geen geval tegen het gezicht worden geplaatst.

Het masker is een **dubbellaags** masker. Het gebruikte materiaal is een **synthetische** stof (65 % polyester / 35 % katoen voor de binnenkant en 100 % polyester voor de buitenkant). Dankzij dit materiaal kunt u het masker wassen en hergebruiken. Het is mogelijk om een extra filter te plaatsen. We bevelen u aan om niet te veel extra filters in te brengen, want dat zou de ademhaling van de drager van het masker kunnen belemmeren.

Dit masker en deze gebruiksaanwijzing vormen geen medisch advies of bieden geen absolute bescherming van anderen als de drager ziek is. Zieken worden uitgenodigd om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun arts en te vragen of ze hun huis wel of niet kunnen verlaten, en welke andere nuttige maatregelen ze kunnen nemen om zichzelf en anderen te beschermen (isolement, afstand nemen, barrièregebaren, hygiëne...).

info@masks.brussels

Referentie : <http://couturiers.masks.brussels/public/certificat-resistance.pdf>